



hFon
One phone.
Millions of possibilities.

Quick-Start
Bedienungsanleitung

Telehealth Touchscreen Mobiltelefon






Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig durch.



HMM Diagnostics GmbH
D-69221 Dossenheim, Germany
www.hmm.info

Inhalt

Wichtige Informationen	4
I. Einleitung	10
II. Ihr  ^{Fon}	11
Das  ^{Fon} aufladen und den Akku einsetzen	13
SIM Karte einsetzen	14
Einsetzen von optional erhältlichen Modulen*	15
Navigationsstift verwenden	15
Anwendungen öffnen und schließen	16
III. Setup & Bedienungsfunktionen	17
Die wichtigsten Optionen des HOME Bildschirms	18
Erste Schritte: So richten Sie Ihr  ^{Fon} ein	21
Kamera	34
Hinweise zu Richtlinien	35
Konformitätserklärung	35
Wichtige Informationen zur Sicherheit	36
WEEE-Hinweis	37
RoHS-Einhaltung	37
Technische Spezifikationen	38

Wichtige Informationen

Bitte zuerst lesen!



Sicherheitshinweise / Allgemeine Verwendung

- Achten Sie darauf, Gerät und Zubehör von Kleinkindern fern zu halten, da Kleinteile verschluckt werden könnten. *Verschlucken kann zu Ersticken oder schlimmen Verletzungen führen!*
- Achten Sie darauf, einen Mindestabstand von 15 cm zwischen dem Gerät und einem Herzschrittmacher einzuhalten. *Nichtbeachtung kann zu schwerwiegenden Störungen des Herzschrittmachers (oder anderer medizinischer Geräte) führen!* Schalten Sie Ihr Gerät im Zweifelsfall besser ab, um dies zu verhindern!
- Die Verwendung dieses Gerätes ist in den meisten Krankenhäusern verboten, da elektromagnetische Störungen medizinische Geräte beeinflussen und/ oder stören können. *Halten Sie sich an die vor Ort geltenden Bestimmungen und schalten Sie Ihr Gerät ggf. ab!*
- Falls Sie selbst ein anderes, medizinisches Gerät verwenden, erkundigen Sie sich bei dessen Hersteller, ob das Gerät einen Schutz gegen externe RF-Strahlung besitzt. Kontaktieren Sie ggf. Ihren Arzt wenn Sie Zweifel an der Vereinbarkeit der Geräte miteinander haben. *Verwenden Sie dieses Gerät nur, wenn Sie alle Störungen anderer medizinischer Geräte ausschließen können.*
- Gehen Sie mit Sorgfalt und Vernunft mit diesem Gerät um.

- Nehmen Sie das Gerät nicht eigenständig auseinander. Stecken Sie niemals Gegenstände in Gehäuseschlitze oder andere Öffnungen des Gerätes.
- Klappen Sie die Schutzlaschen für SIM- oder T-Flash-Karte sowie die Schutzlasche für optional erhältliche Module* vorsichtig um. Reißen Sie die Schutzlaschen nicht ab.
- Achten Sie stets darauf, dass das Gerät nicht nass wird und keine Feuchtigkeit in die Gehäuseöffnungen eintritt. *Feuchtigkeit kann zu schweren Schäden am Gerät führen!* Fassen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen an!
- Vermeiden Sie Stöße oder Herunterfallen des Gerätes. Behandeln Sie dieses Elektronikprodukt stets mit der nötigen Vorsicht, um Schaden am Gerät zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist. Glas- oder Acrylglasscherben können zu Verletzungen an Händen oder im Gesicht führen.
- Lackieren Sie Ihr Gerät nicht. Die Lacke könnten das Gehäuse beschädigen, bewegliche Teile verkleben und somit das Gerät insgesamt beschädigen oder optional erhältliche Module* für das Gerät irreparabel beschädigen.

* Nähere Informationen zu Auswahl und Umfang der optionalen Messmodule finden Sie im entsprechenden Kapitel dieses Handbuchs oder auf www.hLine.eu

- Wenn das Gerät über einen Kamerablitz oder eine andere Lichtquelle verfügt, vermeiden Sie es, Kinder, andere Personen oder Tiere damit zu blenden.
- Betreiben Sie das Gerät bzw. Kopfhörer, die Sie im Zusammenhang mit dem Gerät verwenden, mit moderater Lautstärke. Es kann zu bleibenden Hörschäden führen, wenn Kopfhörer über einen längeren Zeitraum bei übermäßiger Lautstärke verwendet werden.

Sicherheitshinweise /Netzteil und Zubehör

- Verwenden Sie für das im Lieferumfang enthaltene Netzteil ausschließlich solche Netzquellen, die sich laut Etikettbezeichnung dafür eignen.
- Entfernen Sie nicht den Akku aus dem Gerät, während dieser aufgeladen wird.
- Versuchen Sie nicht den Akku zu öffnen oder zu reparieren. Der Akku darf weder verbogen, noch durchlöchert, angebohrt, kurzgeschlossen, in Wasser oder Feuer geworfen oder übermäßigen Temperaturen ausgesetzt werden.
- Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Originalakku betrieben werden. **Bei Verwendung eines anderen Akkus besteht Explosionsgefahr!**
- Setzen Sie das Gerät keiner übermäßigen Feuchtigkeit oder extremen Temperaturen aus. Gerät oder Akku sollten nicht über einen längeren Zeitraum in einem Fahrzeug oder einem anderen Ort gelagert werden, wo die Temperatur über 60°C (140°F) ansteigen kann. Vermeiden Sie eine Überhitzung des Akkus!

- Verhindern Sie versehentlichen Kontakt der Akkus mit anderen Metallteilen, da auf diese Weise stromführende Verbindungen hergestellt werden können, die zu einer Beschädigung des Akkus führen können.
- Wenn Sie optional erhältliche Messmodule mit diesem Gerät benutzen, *verwenden Sie ausschließlich die vom Hersteller dafür zugelassenen Module*. Andere Module können das Gerät beschädigen oder zu falschen Messergebnissen führen.
- Entsorgen oder Recyceln Sie den Akku, das Mobiltelefon, das Ladegerät und/oder sonstiges Zubehör, Ersatzteile und Module entsprechend der lokalen Bestimmungen.



Li-ion



Sicherheitshinweise /besondere Umgebung

- Beim Steuern von Fahrzeugen ist es (abgesehen von dringenden Notfällen) nicht zulässig, Telefondienste mit Geräten zu nutzen, welche in der Hand gehalten werden müssen. In einigen Ländern ist die Verwendung von Mobiltelefonen mit Freisprecheinrichtung erlaubt.
- Verwenden Sie das Gerät nach Möglichkeit nicht beim Steuern eines Fahrzeugs. Beachten Sie stets alle Bestimmungen hinsichtlich Einschränkung des Gebrauchs von Mobiltelefonen im Straßenverkehr und halten Sie sich an die gesetzlichen Vorschriften dies-

bezüglich.

- Stellen Sie sicher, dass alle Mobiltelefone oder zugehörige Ausrüstung (z.B. Freisprechanlage), die in Ihrem Fahrzeug eingebaut sind, sicher befestigt sind.
- Legen Sie Gerät und Zubehör nicht in die Nähe oder in den Aktionsradius von im Auto eingebauten Airbags. *Bei unsachgemäß eingebauten Mobiltelefonen können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.*
- Verwenden Sie das Gerät nicht an einer Tank-Zapfsäule oder in der Nähe von Chemikalien und Treibstoffen. Achten Sie stets auf Warnhinweise und schalten Sie das Gerät ab. Ihr Gerät kann Explosionen oder Brände in und um Kraftstoff- oder Chemikalienlager- und Transport- oder Sprengbereichen hervorrufen.
- Wenn Sie sich in explosionsgefährdeten Bereichen oder an Orten befinden, an welchen brennbare Materialien vorhanden sind, sollte das Gerät abgeschaltet werden. Durch Funken in solchen Umgebungen können Brände und Explosionen ausgelöst werden, die zu schweren Verletzungen oder gar zum Tod führen können. Verwenden Sie das Gerät nicht an Tankstellen, Chemiewerken und Lagern in der Nähe von Sprengstoffen oder Zündern.
Potenziell explosive Umgebungen sind oft, allerdings nicht immer, als solche gekennzeichnet. Beachten Sie die entsprechenden Hinweise. Solche Umgebungen können sein: Räume unter Deck (bei Schiffen), Transport-, Verteilungs- oder lagereinrichtungen für Chemikalien, mit Flüssiggas (wie Propan oder Butan) betriebene Fahrzeuge, Bereiche, in denen die Luft

Chemikalien oder Partikel (wie z.B. Getreide, Staub oder Metallpulver) enthält sowie alle anderen Bereiche, in welchen Sie aufgefordert werden, den Motor Ihres Fahrzeugs auszuschalten.


- Schalten Sie das Gerät in allen Einrichtungen aus, in denen Sie durch Schilder oder sonstige Hinweise dazu aufgefordert werden.
- In den meisten Ländern ist es verboten, dieses Gerät auf Flügen zu verwenden, da es das Navigationssystem und das Kommunikationsnetz von Flugzeugen stören kann. Halten Sie sich bitte an die geltenden Empfehlungen und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Mobiltelefonen und schalten Sie das Gerät ggf. ab.

I. Einleitung


Vielen Dank, dass Sie sich für das **h^{Fon}** entschieden haben. Dieses Telehealth Touchscreen Smartphone ermöglicht Ihnen neben den herkömmlichen Vorzügen eines Mobiltelefons zusätzlich die umfassende Überwachung Ihrer Vitalwerte in Kombination mit den entsprechenden **smartLAB[®]** Messsystemen. Einen Überblick der in diesem Telemonitoring-Set enthaltenen Produkte und zusätzliche Informationen zur HMM **h^{Line}** finden Sie auf **www.smartlab.org**.


In dieser Quick-Start Bedienungsanleitung erfahren Sie die grundlegenden Funktionen im Umgang mit Ihrem **h^{Fon}** sowie eine detaillierte Beschreibung der Applikation, mit welcher Sie Ihre Vitaldaten darstellen und verwalten können.

Vorderseite

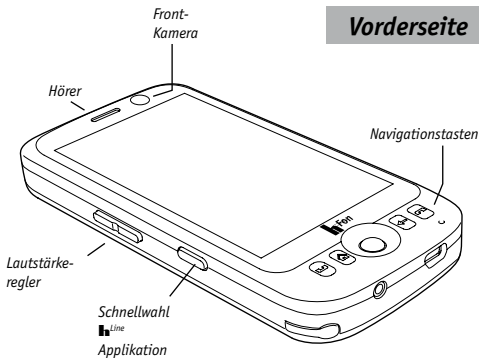

Rückseite

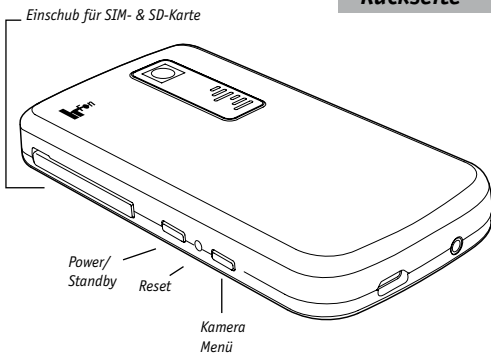

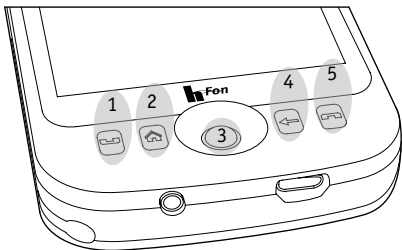

Über den Navigationsbereich können die grundlegenden Funktionen Ihres **Fon** direkt angewählt werden:

- 1 Telefon grün: Schnellwahl Telefonmenü
- 2 Home: Schnellwahl HOME-Bildschirm
- 3 Navigations-Trackball / Bestätigung (drücken)
- 4 Zurück: geht zum vorherigen Menü zurück
- 5 Telefon rot: Anruf beenden / abbrechen

Einzelne Menüpunkte können entweder mit den Navigationstasten oder durch Antippen des TouchScreen Bildschirms ausgewählt werden. Sie können dies direkt mit Daumen oder Zeigefinger, oder mit dem im Lieferumfang enthaltenen Stift tun. Im Laufe der Zeit werden Sie Ihre bevorzugte Methode zum Blättern und Auswählen einzelner Menüpunkte entwickeln.

Das **h^{Fon}** aufladen und den Akku einsetzen

Vor der ersten Inbetriebnahme müssen Sie den Akku Ihres **h^{Fon}** für mindestens XX Stunden aufladen. Verwenden Sie dazu bitte das im Lieferumfang enthaltene USB-Ladekabel und stecken Sie dieses in die dafür vorgesehene Öffnung an der Unterseite des Telefons (siehe Abbildung 1). Um den Akku einzusetzen, schieben Sie vorsichtig die Rückabdeckung des **h^{Fon}** nach unten und heben Sie diese dann ab.

Setzen Sie dann den Akku so ein, dass die **h^{Fon}** Beschriftung nach oben zeigt und die drei Pin-Kontakte in der linken Ecke liegen (vgl. Abbildung 2).


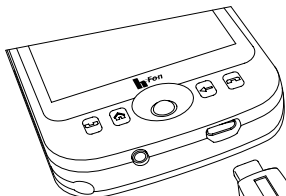


Abb. 1


Abb. 2

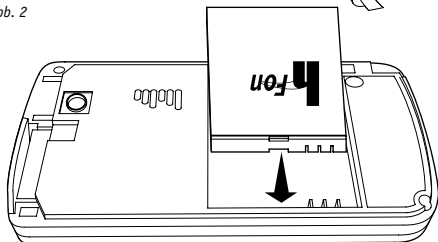

SIM Karte einsetzen

Um mit dem **fon** telefonieren und mobiles Internet nutzen zu können, müssen Sie an der Seite des Gerätes in den dafür vorgesehenen Einschub die SIM Karte Ihres Mobilfunkanbieters einsetzen.

Klappen Sie dazu erst die Schutzlasche nach unten. Der SIM Karten Einschub ist der obere der beiden Einschubschlitze. Nehmen Sie nun Ihre SIM Karte und schieben Sie sie vorsichtig in den Schlitz. Die abgeknickte Ecke der SIM Karte muss dabei links oben sein (vgl. Abbildung).

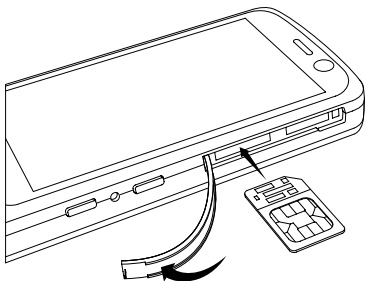


Einsetzen von optional erhältlichen Modulen*

Neben seiner Funktion als Smartphone besitzt Ihr **h^{Fon}** einen optional bestückbaren Aufnahmeschlitz für zusätzliche Messmodule (wie z.B. ein Blutzuckermessmodul). Damit kann Ihr **h^{Fon}** zu einem vielseitig einsetzbaren Healthcare Smartphone aufgerüstet werden und Ihnen viele Zusatzfunktionen rund um die persönliche Gesundheitsverwaltung ermöglichen.

Wie genau Sie die optional erhältlichen Module in das Gerät einsetzen, entnehmen Sie bitte der separaten Bedienungsanleitung, welche jedem Modul beiliegt.

Navigationsstift verwenden

Neben Trackball- und TouchScreen Bedienung verfügt Ihr **h^{Fon}** über einen Stift, mit dem auf dem Bildschirm navigiert werden kann. Sie können den Stift aus der dafür vorgesehenen Vorrichtung an der Gerätunterseite ziehen und nach Gebrauch auch dort wieder hineinstecken.

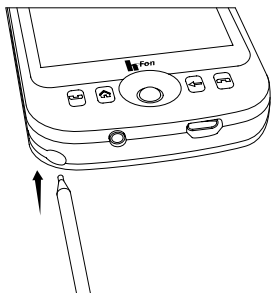

* Nähere Informationen zu Auswahl und Umfang der optionalen Messmodule sowie zum **h^{Line}** Telemonitoring System finden Sie auf www.hLine.eu

Anwendungen öffnen und schließen

Navigieren Sie mit Ihren Fingern (oder dem im Lieferumfang enthaltenen Stift) über den TouchScreen Bildschirm Ihres **h^{Fon}**, um durch die verschiedenen Programme und Applikationen zu navigieren.

Öffnen Sie eine Applikation durch leichtes Antippen/Drücken. Navigieren Sie *innerhalb* von Menüs intuitiv mit Hilfe der auf dem Display abgebildeten Pfeil-Symbole und sonstigen Icons.

Alternativ können Sie auch mit Hilfe des „Trackballs“ (Schnellwahltaste „3“) navigieren. Fahren Sie dabei mit Ihrem Daumen vorsichtig über den Trackball nach oben oder unten. Wählen Sie bestimmte Menüpunkte durch kurzes Drücken des Trackballs aus.

Hinweis: Nicht alle Applikationen unterstützen die Navigation über den Trackball. Verwenden Sie in solchen Fällen die Navigation über das TouchScreen Display.

Zum vorherigen Untermenü gelangen Sie jeweils immer zurück, indem Sie die Schnellwahltaste „4“ im unteren Navigationsbereich Ihres **h^{Fon}** drücken.

Durch Drücken der Schnellwahltaste „5“ brechen Sie alle Vorgänge ab und gelangen immer zurück auf den HOME Bildschirm.

III. Setup & Bedienungsfunktionen

Nachdem Sie den Akku eingesetzt und vollständig geladen haben, können Sie Ihr **h^{Fon}** einschalten. Drücken Sie dazu den Power/ Standby Knopf an der Seite des Gerätes für mindestens XX Sekunden. Es erscheint das **h^{Fon}** Logo und danach der HOME Bildschirm.



Hinweis: Der HOME Bildschirm ist der Ausgangspunkt für alle Funktionen rund um Ihr **h^{Fon}**. Sie können ihn jederzeit über die Schnellwahltaste „2“ (HOME Bildschirm) aufrufen.

Die wichtigsten Optionen des HOME Bildschirms

Der HOME Bildschirm vereint die wichtigsten Funktionen des ■^{Fon} auf einen Blick. Von hier aus können Sie beispielsweise Anrufe tätigen, SMS verfassen, die hLine Applikation starten oder die anderen Applikationen des ■^{Fon} aufrufen.



Telefon

Öffnet den TouchScreen Ziffernblock, mit dessen Hilfe Sie eine gewünschte Telefonnummer eintippen können. Sie können das Telefon auch über die Schnellwahltaste „1“ direkt aufrufen, wenn Sie sich nicht auf dem HOME Bildschirm befinden.



SMS

Öffnet das Menü, um SMS (Kurznachrichten) zu verfassen. Drücken Sie dazu zuerst das Menü zum Verfassen einer neuen SMS. Geben Sie den Text über die TouchScreen Tastatur ein. Sie können dazu Ihre Finger oder den Stift verwenden.



hLine

Öffnet die **hLine** Applikation zum Verwalten Ihrer Vitaldaten. Diese Applikation beinhaltet ein Gesundheitstagebuch, in welches verschiedenste Messergebnisse (Blutzucker, Blutdruck, Fitnesswerte usw.) eingetragen werden können. Nutzen Sie diese Applikation zum Verwalten von Vitalwerten, welche Sie mit anderen **smartLAB**[®] Produkten oder mit einem der optional erhältlichen Messmodule gemessen haben.

Hinweis: Die **hLine** Applikation kann auch über die Schnellwahltaste an der Seite des Gerätes direkt aufgerufen werden.



hFon

Öffnet die Programmübersicht aller Applikationen, Anwendungen und Einstellungen, die Ihrem **hFon** zur Verfügung stehen.

In diesem Menü tätigen Sie die grundlegenden Geräteeinstellungen, verwalten Adressen und Kontakte oder öffnen den Browser für das mobile Internet. Sie können hier zudem Fotos, Bilder und sonstige Dateien verwalten und andere **hFon** Standard-Applikationen aufrufen (wie z.B. Kalender, Tasks, Rechner oder Spiele).

Die Applikation **hFon** ruft das Betriebssystem auf, das Ihrem **hFon** zu Grunde liegt.



Vitalwerte

Wenn Sie Ihr **h^{Fon}** mit optional erhältlichen Messmodulen verwenden oder Messgeräte aus dem **smartLAB[®]** / **h^{Line}** Programm verwenden, um Ihre Vitaldaten zu verwalten, werden die Ergebnisse der letzten Messungen mit Datum & Uhrzeit ebenfalls im HOME Bildschirm angezeigt. Sie müssen dann nicht immer erst das Tagebuch der **hLine** Applikation aufrufen, um Ihren letzten Wert zu kontrollieren*.

Die Anzeige von Vitalwerten erscheint jedoch nur dann, wenn Sie das **h^{Fon}** in den o.g. Fällen verwenden.


* Nähere Informationen zu Auswahl und Umfang der optionalen Messmodule sowie zum **h^{Line}** Telemonitoring System finden Sie auf www.hLine.eu

Erste Schritte: So richten Sie Ihr **h^{Fon}** ein

Rufen Sie den HOME Bildschirm auf und drücken Sie die **hFon** Applikation. Wählen Sie die Applikation **hFon einrichten**.



Die Applikation **hFon einrichten** führt Sie Schritt für Schritt durch die wichtigsten Punkte im Umgang mit Ihrem **h^{Fon}**. Beim Start der Applikation sehen Sie eine Übersichtsliste der einzelnen Punkte. Scrollen Sie mit Finger, Stift oder Trackball die Liste herunter und wählen Sie einzelne Menüpunkte durch Drücken auf den Menüpunkt oder den „Anzeigen“ Knopf aus.

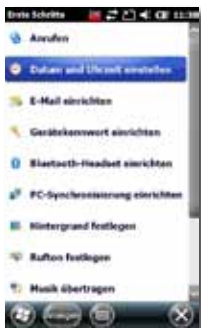

zur hFon Applikation


Auswählen

Tastatur

Abbrechen, zurück zum HOME Bildschirm

Anrufen

Dieser Menüpunkt erklärt, wie Sie einen Anruf mit Ihrem **hFon** tätigen. Neben der hier genannten Möglichkeit (Drücken der Schnellwahltaste „1“) können Sie auch auf dem HOME Bildschirm das Telefon Symbol drücken, um einen Anruf durchzuführen.

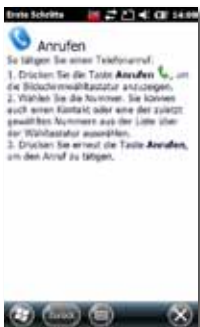

Hinweis: Zum Telefonieren muss eine SIM Karte in Ihr **hFon** eingesetzt sein.

Datum und Uhrzeit einstellen

Um Kalender, Wecker, die **hLine** Applikation und andere Anwendungen nutzen zu können, sollten Sie Datum und Uhrzeit Ihres **hFon** richtig einstellen. Dieses Menü führt Sie durch den Einstellungsvorgang.



← Anzeige der aktuellen Einstellungen

← Drücken Sie den Link, um Datum und Uhrzeit zu ändern




Wählen Sie Ihre Zeitzone durch Drücken des Pfeils für das Drop-down Menü

Stellen Sie Datum durch Auswählen auf dem Kalender und Uhrzeit durch Auswählen von Stunde/ Minute/ Sekunde und Anpassen mittels der Pfeiltasten.

Bestätigen Sie mit OK

Wollen Sie neben der Uhrzeit auch noch eine (oder mehrere) Weckzeiten einstellen, wählen Sie das Menü für Wecker über die Pfeiltasten im oberen Bereich aus.

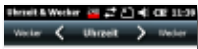

← Drücken Sie den Pfeil, um den Wecker einzustellen



Auswahl der verschiedenen Wecker. Aktivieren Sie den Wecker durch Antippen des ersten Kästchens.

Ändern Sie die Weckeinstellungen (Datum, Uhrzeit, Alarmton usw.) durch Drücken der jeweiligen Zeile.



Im Feld „Beschreibung“ können Sie Weckern verschiedene Namen geben. Wählen Sie durch Antippen den entsprechenden Wochentag, den Alarm-Ton und die verschiedenen Optionen wie Vibration, Wiederholung usw.

E-Mail einrichten

Bevor Sie mit Ihrem **h^{Fon}** E-Mails senden und empfangen können, müssen Sie auf Ihrem Gerät ein E-Mail-Konto einrichten. Dieser Setup-Assistent hilft Ihnen dabei, auf einfache Weise POP-, IMAP- oder Exchange Server Konten einzurichten.



← Drücken Sie den Link, um ein E-Mail Konto einzurichten



Geben Sie E-Mail Adresse und Kennwort über die unten eingeblendete Tastatur ein.

Aktivieren Sie „Kennwort speichern“, um dieses nicht jedes Mal neu eingeben zu müssen.



Der Setup-Assistent führt Sie Schritt für Schritt durch den Einrichtungsprozess Ihres E-Mail Kontos.

Legen Sie Name, Postfach und Kennwort fest.

Abschließend stellen Sie ein, mit welcher Frequenz Ihr **hFon** E-Mails vom Server abholen soll.



Zum Verfassen einer E-Mail öffnen Sie innerhalb der hFon App die entsprechende E-Mail Applikation. Wählen Sie Ihr E-Mail Konto und tippen dann auf „Neu“. Schreiben Sie Ihre E-Mail mit der eingeblendeten Tastatur.

Geräte Kennwort einrichten

Zum besseren Schutz Ihrer Daten, können Sie Ihr **h^{Fon}** durch ein Kennwort sperren. Es ist dann nach jedem Einschalten des Gerätes erforderlich, das Kennwort einzugeben.



Legen Sie fest, nach welcher Zeitspanne die Abfrage des Geräte Kennworts erforderlich ist.

Wählen Sie den Kennworttyp, geben Sie das Kennwort ein und bestätigen Sie es.



Bluetooth-Headset einrichten

In diesem Menüpunkt können Sie ein Bluetooth-Headset so einrichten, dass Sie darüber mit dem **■^{Fon}** telefonieren können. Dies kann u.U. für Telefonieren im Auto usw. sehr nützlich sein.



Öffnen Sie das Menü. Der Assistent führt Sie Schritt für Schritt durch den Einrichtungsprozess.

Klicken Sie auf „Neues Gerät hinzufügen“. Im Anschluss wird nach Bluetooth-fähigen Geräten in der Umgebung gesucht. Wählen Sie das Headset aus und geben Sie das erforderliche Gerätekenntwort dafür ein. Das Kennwort finden Sie in der Bedienungsanleitung des Partnergerätes (z.B. Headset). Bestätigen Sie durch Hinzufügen des Gerätes zur Geräteliste.



Um nach dem Herstellen einer Partnerschaft zwischen den Geräten einen COM-Anschluss festzulegen, wechseln Sie im oberen Navigationsbereich auf „COM-Anschlüsse“.



Wechseln Sie zu „COM-Anschlüsse“



Wählen Sie das Gerät, für das ein COM-Anschluss definiert werden soll, und folgen Sie dem Setup-Assistent.




PC-Synchronisierung einrichten

Sie können Ihre E-Mails, Kontakte, Bilder und Musiktitel mit Ihrem Desktop-PC synchronisieren. Der Einrichtungs-Assistent führt Sie Schritt für Schritt durch den Synchronisierungsprozess.



Öffnen Sie das Menü zum Synchronisieren.

← Klicken Sie auf den Link, um durch den Synchronisierungsprozess geführt zu werden.

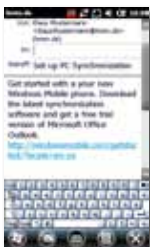

Hintergrund festlegen

Sie können Ihr **hFon** personalisieren, indem Sie das Hintergrundbild des HOME Bildschirms ändern. Dieser Assistent hilft Ihnen bei der Einrichtung eines neuen Designs. Um den original **hFon** HOME Bildschirm wiederherzustellen, wählen Sie in diesem Menü „hFon Today Screen“ aus.



Öffnen Sie das Menü zum Ändern des HOME Bildschirms.

Folgen Sie dem Assistenten und wählen Sie aus verschiedenen Design-Vorgaben Ihr Lieblingsdesign aus oder laden Sie sich kostenlose Zusatzdesigns über den angegebenen Link herunter.



Rufton festlegen

Sie können Ihr **hFon** personalisieren, indem Sie den Klingelton ändern. Dieser Assistent hilft Ihnen bei der Einrichtung eines neuen Ruftons.



Öffnen Sie das Menü zum Ändern des HOME Bildschirms.

Folgen Sie dem Assistenten und wählen Sie aus verschiedenen Klingelton-Vorgaben Ihren Lieblingsrufton aus oder laden Sie sich kostenlose Töne über den angegebenen Link herunter.

Legen Sie fest, für welche Art von Anruf Sie welchen Klingelton benutzen möchten.



Musik übertragen

Um Musikdateien auf Ihr **h^{Fon}** zu laden, müssen Sie dieses per Kabel mit Ihrem PC verbinden. Danach müssen beide Geräte miteinander synchronisiert werden. Hier können Sie nachlesen, welche Anweisungen Sie dazu befolgen müssen.



Onlinehilfe und Anleitung

Sie haben nun mit Hilfe dieses Assistenten die grundlegenden Einrichtungen an Ihrem **h^{Fon}** getätigt. Es gibt darüber hinaus noch umfassende Onlinehilfen und Anleitungen zur erweiterten Einrichtung des Gerätes, die Sie in diesem Menüpunkt finden können.

Erste Schritte hinzufügen/ entfernen

Nachdem Sie die grundlegenden Einrichtungen getätigt haben, können Sie die Applikation **hFon einrichten** aus dem Übersichtsbildschirm der **hFon** Applikation entfernen. Die Applikation wird dann nicht mehr eingeblendet.

Sie können jederzeit vom HOME Bildschirm zur Applikation **hFon einrichten** zurückkehren, indem Sie im Startmenü zum Ordner „Programme“ wechseln und auf **Erste Schritte** tippen.

Kamera

Ihr **hFon** besitzt eine integrierte 2-Megapixel Digitalkamera, mit welcher Sie Fotos aufnehmen können. Sie können die Kamera über die Schnellwahltaste an der Seite des Gerätes oder im Untermenü „HiCamera“ der **hFon** Applikation aufrufen.

Im Display wird daraufhin der gewählte Ausschnitt der Linse angezeigt. Um ein Foto zu machen, tippen Sie kurz auf das Kameralinsen-Icon im unteren Displaybereich. Das Bild wird automatisch auf Ihrem **hFon** gespeichert.

Um Fotos und Bilder anzusehen und zu verwalten, öffnen Sie die **hFon** Applikation auf dem HOME Bildschirm und wählen dann das entsprechende Untermenü für Bilder & Fotos.

Hinweise zu Richtlinien

Konformitätserklärung

Produkte mit einem CE-Etikett erfüllen die R&TTE-Richtlinie (99/5/EC), die von der EU-Kommission herausgegeben wurden.

WEEE-Hinweis

Die WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)-Direktive, die als Europäisches Gesetz am 13. Februar 2003 in Kraft trat, führte zu einer umfassenden Änderung bei der Entsorgung ausgedienter Elektrogeräte.

Der vornehmliche Zweck dieser Direktive ist die Vermeidung von Elektroschrott (WEEE) bei gleichzeitiger Förderung der Wiederverwendung, des Recyclings und anderer Formen der Wiederaufbereitung, um Müll zu reduzieren.



Das WEEE-Logo auf dem Produkt und auf der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Sie sind dafür verantwortlich, alle ausgedienten elektrischen und elektronischen Geräte an entsprechenden Sammelstellen abzuliefern. Eine getrennte Sammlung und sinnvolle Wiederverwertung von Elektroschrott hilft dabei, sparsamer mit den natürlichen Ressourcen umzugehen. Des Weiteren ist die Wiederverwertung des Elektroschrotts ein Beitrag, unsere Umwelt und damit auch die Gesundheit aller Menschen zu erhalten. Weitere Informationen über die Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte, die Wiederaufbereitung und die Sammelstellen erhalten Sie bei lokalen Behörden, Entsorgungsunternehmen, im Fachhandel und beim Hersteller des Geräts.

RoHS-Einhaltung

Dieses Produkt entspricht der Direktive 2002/95/EC des Europäischen Parlaments und des Rats vom 27. Januar 2003 bezüglich der beschränkten Verwendung gefährlicher Substanzen in elektrischen und elektronischen Geräten (RoHS) sowie seiner Abwandlungen.

Technische Spezifikationen

- Prozessor: K3 ARM 926.460 MHz
- Speicher: ROM 512 MB, RAM 128 MB
- Quad-band/GSM/GPRS/EDGE
- 3,7" OLED-LCD TouchFlo Display mit 480 x 800 WVGA Auflösung
- Bedienung über TouchFlo 3D, Trackball und Knöpfe
- 3D G Sensor integriert
- Kamera: Mini 2MPixel mit Auto-Fokus
- Kommunikation: WIFI IEEE 802.11 b/g, Bluetooth 2.0 mit Enhanced Data Rate und A2DP für kabellose Stereo Headsets und ANT AP2
- GPS mit integrierter Antenne
- Betriebssystem: Windows Phone (6.5)
- Micro-SD Karte mit max. 4-16 GB (SD 2.0 kompatibel)
- 3.5 mm Audio Jack & Lautsprecher
- Unterstützte Audio-Formate: AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB, AMR-WB, QCP, MP3, WMA, WAV
40 polyphone & standard MIDI
- Micro USB Slot für Datentransfer, Akkuaufladen und Dockingstation.
- Abmessungen: 115 x 62 x 14 mm (H x B x T)
- Gewicht: 160 g
- Erweiterungseinschübe: Einschub für optional erhältliche Messmodule (wie z.B. Blutzuckermesssystem)

Hersteller:



HMM Diagnostics GmbH
Friedrichstr. 89
D-69221 Dossenheim, Germany

mail: info@hmm.info
www.hmm.info

Weitere Informationen zu den smartLAB® Produkten /
More information on our smartLAB® products:

www.smartlab.org